



Plataforma Biotempak Walmart

Alta de nuevos proveedores

Marca autorizada de
termógrafadores para
entregas perecederas a cedis

Walmart 

Alta de nuevos proveedores

1. Ser propietario de al menos una de nuestras soluciones para el monitoreo de la cadena de frío en tiempo real aceptadas en el proyecto Walmart (A90 o BTP Lux)
2. Crear una cuenta para su empresa en nuestra plataforma Biotempak por medio del siguiente enlace: <https://rtf.biotempak.com/#/user/signup>
3. Es indispensable contar con la siguiente la siguiente información para lograr el alta de su nueva cuenta:
 - ID y Código Adicional de alguno de sus dispositivos Biotempak Real Time
 - Cuenta de correo principal a registrar
 - Contraseña
 - Nombre de su empresa
 - Nombre completo del responsable a cargo de la cuenta
 - Número celular del responsable a cargo de la cuenta



The screenshot shows a registration form with two main sections: 'Autenticación' and 'Información de Registro'.
Autenticación: Includes fields for 'ID del dispositivo' (with a hint 'en la parte frontal del dispositivo') and 'Código adicional' (with a hint 'en la parte posterior del dispositivo'). Below these is a note: 'Ingrese la ID del dispositivo y el código adicional de cualquier dispositivo para la autenticación. Se pueden agregar otros dispositivos en la plataforma en la nube.'
Información de Registro: Includes fields for 'Email' (with a hint 'Tu correo electrónico'), 'Contraseña' (with a hint 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres'), 'Nombre de la empresa' (with a hint 'Solo se puede registrar una cuenta para el mismo nombre de compañía.'), and 'Tu nombre' (with a hint 'Escriba su nombre y apellido.'). There are also fields for 'Código de verificación' (with a hint 'Haga clic en "Obtener código" primero, y obtenga el código de verificación de su correo electrónico.' and a button 'Obtener código') and 'Escriba la contraseña otra vez' (with a hint 'Confirmar contraseña'). A 'Teléfono móvil' field includes a country selector (set to Mexico, +86) and a hint 'Seleccione su país y luego ingrese el número de teléfono.'. An 'Enviar' button is at the bottom.

4. Solicitar a Biotempak la integración al proyecto como proveedor autorizado Walmart a los siguientes correos electrónicos:

- proveedores@biotempak.com


Se requiere anexar a su solicitud la siguiente información:

- Correo principal con el que se registró en plataforma Biotempak (paso 3)
- Copia del documento que lo valide como proveedor de Walmart vigente donde sea visible su **“Numero de proveedor proporcionado por Walmart”**.
- Listado de productos autorizados por Walmart.


Alta de nuevos proveedores

5. Biotempak validará su solicitud y les notificará (vía correo electrónico) su activación en la plataforma de Biotempak como proveedor autorizado Walmart o si falta algún requisito.

6. Al ingresar a su cuenta, podrá confirmar la activación de su cuenta como proveedor Walmart al ver un nuevo botón llamado Analizar en el menú de opciones situado a la izquierda de su pantalla.

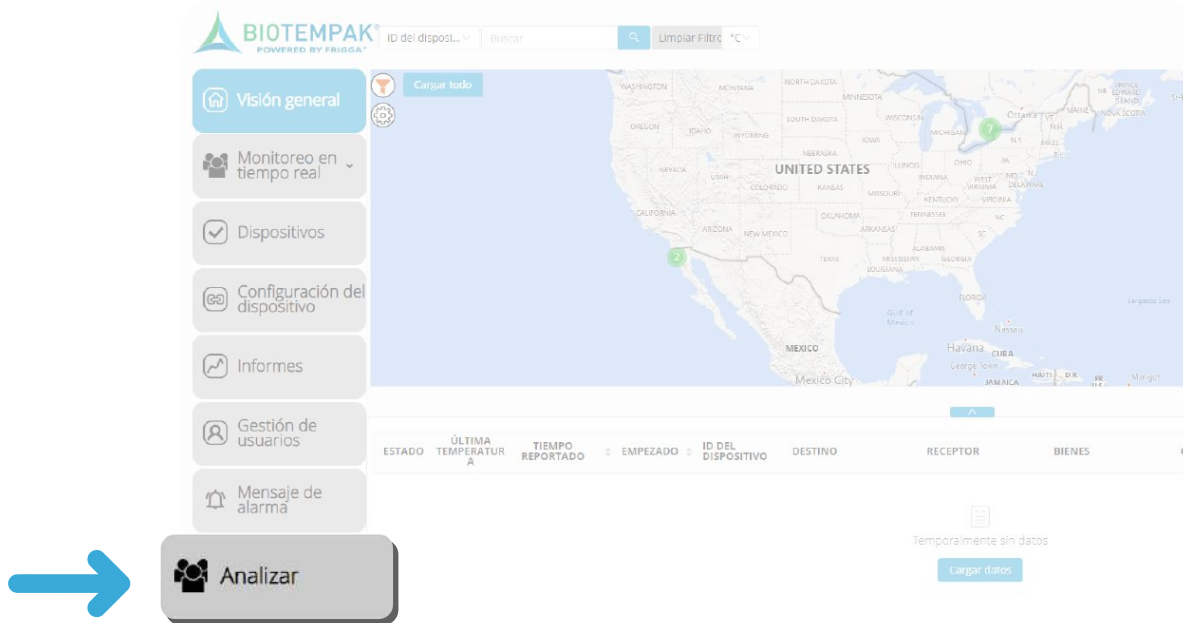

7. Deberá dar de alta sus dispositivos de manera habitual en la plataforma Biotempak para posteriormente compartirlos con Walmart por medio del botón **“compartir dispositivo”** en la sección de Dispositivos.

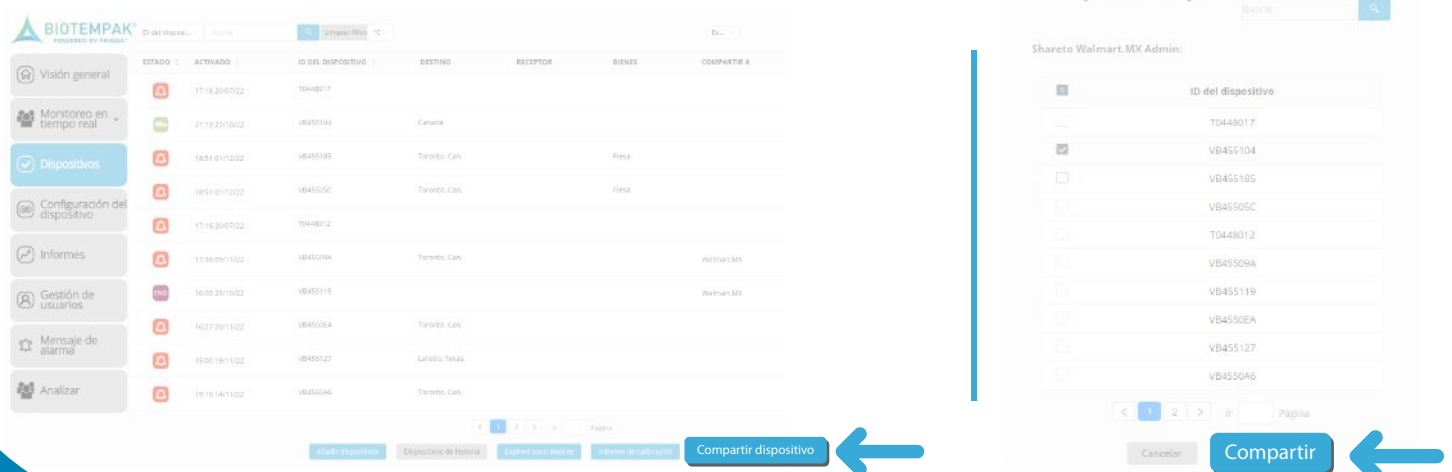

Alta de nuevos proveedores

8. Para confirmar que su dispositivo ha sido compartido con éxito al proyecto Walmart usted podrá leer la leyenda **“Walmart.MX”** en la columna de **“COMPARTIR A”**.

| ESTADO | ACTIVADO | ID DEL DISPOSITIVO | DESTINO | RECEPTOR | BIENES | COMPARTIR A | TIPO | OPERACIÓN |
|--------|--------------------------|--------------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| | <input type="checkbox"/> | 16:27 20/11/22 | VB4550EA | Toronto, Can. | | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 17:16 20/07/22 | T0448017 | | | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 18:51 01/12/22 | VB455185 | Toronto, Can. | Fresa | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 18:51 01/12/22 | VB45505C | Toronto, Can. | Fresa | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 17:16 20/07/22 | T0448012 | | | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 15:00 19/11/22 | VB455127 | Laredo, Texas. | | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 21:18 23/10/22 | VB455104 | Canada | | | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 17:38 09/11/22 | VB45509A | Toronto, Can. | | Walmart.MX | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 16:03 23/10/22 | VB455119 | | | Walmart.MX | De un solo uso | |
| | <input type="checkbox"/> | 19:16 14/11/22 | VB4550A6 | Toronto, Can. | | | De un solo uso | |

9. Llegado a este punto estaremos listos para configurar nuestro dispositivo para un envío a Walmart, para ello nos dirigiremos a la sección de **“Configuración del Dispositivo”** donde seccionaremos el ID de nuestro dispositivo y llenaremos las opciones que el sistema nos arroja en pantalla, tales como:

- Producto (Seleccionar en la lista el producto a enviar)
- Portador (Transportista)
- Ruta del dispositivo (Lugar de salida del producto – CDIS Walmart de entrega)
- Duración estimada del viaje (fecha y hora de salida y entrega estimada)

Configuración del dispositivo

Envío | Umbral de alerta | Resumen

Seleccione el dispositivo: VB45509A

Intervalo de informe(Min.): 60

70% de energía de la batería, quedan 40 días.

Identificación del envío: Por favor, introduzca la identificación del envío

Producto: Seleccionar productos

Portador: Por favor ingrese el nombre del operador

Tiempo de retardo de inicio(Min.): 0

Ruta del dispositivo: Zamora, Mich.

Duración estimada del viaje: 2022-11-09 18:08 - 2022-11-09 18:08

Referencia personal: Por favor, introduzca su referencia personal

Sin parada manual: Desactiva la función de presionar el botón para que el dispositivo no funcione. El dispositivo se puede detener conectando el puerto USB.

Siguiente

NOTA: Si este formulario Walmart no se muestra para su dispositivo, verificar si está compartido correctamente (paso 7 y 8).

Alta de nuevos proveedores

10. Los umbrales de temperatura NO podrán ser modificados y se definen en función del producto seleccionado previamente, estos valores de temperatura son definidos por Walmart y solo será posible configurar los destinatarios para el envío de alertas en caso de que la temperatura sea menor o mayor a dicho umbral.
11. Una vez configurado correctamente el dispositivo, puede iniciar su monitoreo presionando el botón de **START** durante 10 segundos hasta que veamos encender el LED color azul de nuestro dispositivo.
12. Después de encender el dispositivo y pasados unos minutos, podremos consultar la información de nuestro monitoreo de forma remota por medio de la plataforma Biotempak y su aplicación móvil disponible para sistemas IOS y Android.



Alta de nuevos proveedores

13. En la pestaña de analizar podremos tener un multigráfico para poder realizar un comparativo de sus envíos por producto y cedis de entrega Walmart, esta información es visible por la plataforma admin de Walmart para la trazabilidad de sus entregas.

